

MEDIZINISCHE MNS-MASKE mit Ohrbändern- Produktdatenblatt

Typenbezeichnung / Handelsmarke	O 675051 020460 (DE/CA18/24.06.03 OE H-122-01) Moss (DE/0000048855)
Produkt	MEDIZINISCHE MNS-MASKEN
Produktbeschreibung	3-lagig, mit Filter (BFE > 98%) und elastischen Ohrbändern, mit eingearbeitetem, formbarem Nasenbügel, für den einmaligen Gebrauch
Bestimmungszweck	Tröpfcheninfektionsprophylaxe, Patientenschutz und eingeschränkter Schutz für den Träger der Maske, Operations-, Pflege- und Hygiene- Bereiche
EN Spezifikation	CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG, Anhang VII - Klasse 1 Produkt EN14683:2019+AC:2019 – Typ IIR
Zertifikate	HygCen Austria GmbH / DIMDI: DE/CA18/24.06.03 OE H-122-01
Material	Äußere Lage (farbig) Polypropylen Vlies – hydrophob, mittlere Lage Polypropylen Meltblown Vlies - BFE ≥98%, innere Lage (weiß) Polypropylen Vlies – hydrophil, Nasenbügel – Draht mit Polyethylenbeschichtung, Ohrbänder – Polyester/Elastan
Gebrauchshinweise	Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen, um eine möglichst gute Wirkung zu erzielen!
Einschränkung der Verwendung	Der Anwender ist gehalten, ggf. die Artikeleignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen
Allergiehinweis	Latexfrei, glasfaserfrei
Lagerung	Bei Raumtemperatur in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern
Größen	Standardgröße (B)17.5 x (H) 9.5 cm
Farbe	Weiß / blau
Verpackungseinheit (VPE)	50 St. / Spenderbox
Kennzeichnung VPE	Mögliche Hinweise auf VPE beachten, individuelle Lot Nr. zwecks Rückverfolgbarkeit
1 Karton	50 VPE = 2.500 Stück
1 Euro-Palette	16 Kartons
Ursprungsland	Deutschland

ANWENDUNGSHINWEISE



1. VOR DEM ANLEGEN DER MASKE
HÄNDE WASCHEN




2. SICHERSTELLEN, DASS DIE
FARBIGE SEITE DER MASKE NACH
AUSSEN ZEIGT



3. PLATZIEREN SIE DEN
NASENBÜGEL AUF IHREM
NASENRÜCKEN




4. FIXIEREN SIE DIE BÄNDER
HINTER IHREN OHREN

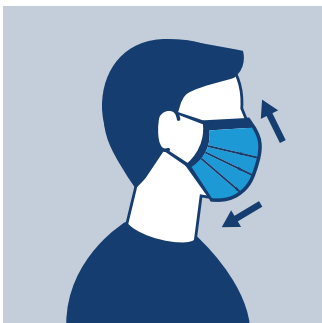

5. BEDECKEN SIE MUND UND
NASE KOMPLETT UND STELLEN SIE
SICHER, DASS DIE MASKE
ENG ANLIEGT



6. PRESSEDIE DEN NASENBÜGEL
FEST AN IHREN NASENRÜCKEN

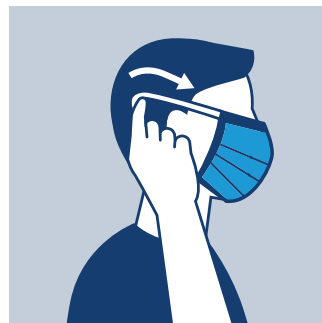

7. ENTFERNEN SIE DIE MASKE MIT
SAUBEREN HÄNDEN VON HINTEN
AN DEN BÄNDERN



8. ENTSORGEN SIE DIE MASKE
IN EINEM GESCHLOSSENEN BE-
HÄLTER, OHNE DIE VORDERSEITE
DIESER ZU BERÜHREN



9. KORREKT ANGELEGTE MASKE



10. DIE MASKE WÄHREND DES
TRAGENS NICHT BERÜHREN. BEI
BERÜHRUNG DER MASKE,
HÄNDE WASCHEN



11. ERSETZEN SIE DIE MASKE,
SOBALD SIE ZU FEUCHT
GEWORDEN IST UND VERWENDEN
SIE DIESE NICHT WIEDER